

VÁŽENÁ KLIENTKO / VÁŽENÝ KLIENTE, děkujeme, že jste si vybrali právě **GENLABS** pro svůj genetický test. Vaše důvěra nás těší a zavazuje k pečlivosti a péči, kterou věnujeme každému vzorku.

Jakmile nám jednou předáte svůj vzorek, můžete kdykoliv v budoucnu jednoduše přibjedenat další testy – vše ostatní provedeme z již uloženého vzorku. Pro tento případ zaškrtněte v Informovaném souhlasu s genetickým vyšetřením (součást žádanky) také **SOUHLAS SE SKLADOVÁNÍM**.



GENETIKA – VĚDOMÝ KLÍČ K SOBĚ.

ZDE JSOU INSTRUKCE PRO ODESLÁNÍ:




1. Doporučujeme poslat vzorek do laboratoře v den odběru, ideálně na začátku pracovního týdne (pondělí/úterý).
2. Po odběru vložte test se vzorkem zpět do přiložené obálky a zašlete ji do laboratoře.
3. Vzorek odešlete pouze spolu s řádně vyplněnou žádankou, elektronickou nebo v papírové podobě, na adresu:

GENLABS s.r.o.
Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice 2

PŘÍJEM VZORKU DO LABORATOŘE A VÝSLEDEK TESTU:

-  O příjmu vzorku do laboratoře vás budeme informovat e-mailem.
-  Výsledky testu obdržíte také e-mailem.

Důležité informace:

-  Sada je jednorázová – používejte pouze neporušenou odběrovou sadu s neporušeným obalem.
-  Před odběrem minimálně hodinu nejzte, nepijte ani si nečistěte zuby.
-  Dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaminaci tamponu cizí DNA.

Krátké instruktážní video pro provedení stěru můžete najít v tomto odkazu:

<https://www.youtube.com/watch?v=4ddtzyF4frc>




GENLABS s.r.o.
Lipová 1789/9
370 05 České Budějovice 2

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ ODBĚROVÉ SADY

ISOHELIX RD-01 BUCCAL SWABS WITH RAPIDRI POUCH


Stěr proveďte nejméně jednu hodinu před jídlem, pitím nebo ideálně ráno po probuzení před vyčištěním zubů.

Bukální stěr nesmí být starší než 48 – 72 hodin.

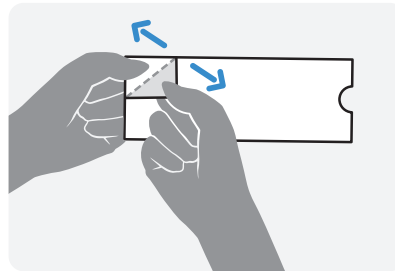


1

Obal obsahující odběrovou sadu otevřete z pravého konce (označeného černými obdélníčky).

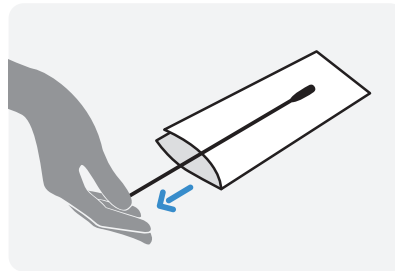


2

Opatrně vyjměte tyčinku s tamponem. Nedotýkejte se bílého tamponu prsty.

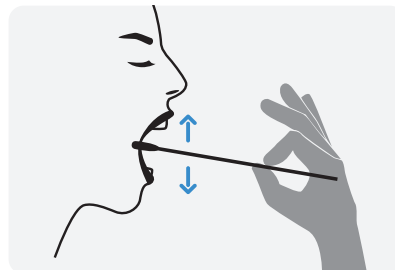


3

Vložte si tampon do úst a pevně třete uvnitř ústní dutiny. Tzn. vnitřní strany tváří a pod horním a dolním rtem uvnitř úst po dobu 2–3 minut.

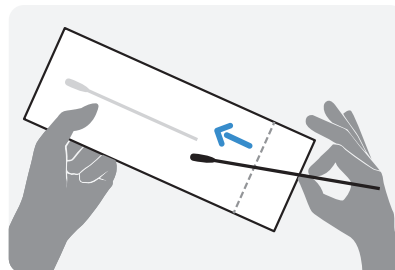

4

Tyčinku s tamponem vložte do speciálního sáčku, tak, aby tampon ležel v sušící oblasti označené jako **Drying Area**. Dbejte, abyste se nedotkli tamponu prsty.

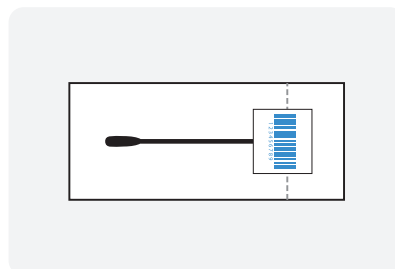

5

Sáček uzavřete tak, jak vidíte na obrázku – na úrovni přerušované čáry – jej přehněte a přelepte čárovým kódem.